



Версія: В

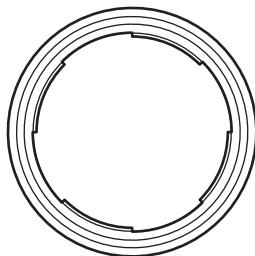

do more™

taskaprosthetics.com/support

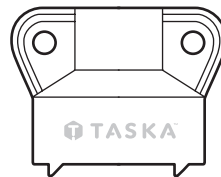

TASKA (TACKA) QWD

Посібник із встановлення
ущільнювального кільця для
практикуючих лікарів



Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Кратія Медтехніка»
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна
Тел.: 0 800 21-52-32
Електронна пошта: uaenr@scratia.ua, ЄДРПОУ: 38670845



TASKA Протетікс Лтд
10 Нельсон Стріт, Ріккартон,
Крайстчерт 8011, Нова Зеландія





Відскануйте цей QR-код, щоб отримати більше корисних матеріалів від компанії TASKA (ТАСКА)

Швидкознімний міоелектричний протез TASKA (ТАСКА) (далі по тексту – TASKA) можна прикріпити до широкого ряду зап'ясткових з'єднувачів або електричних ротаторів, однак не всі ці з'єднання можна зробити водонепроникними. Водонепроникний зап'ястковий з'єднувач вимагає встановлення на протезі руки ущільнювального кільця з відповідним зап'ястковим з'єднувачем, встановленим у гільзу.

Ущільнювальні кільця сумісні тільки з відповідними швидкознімними міоелектричними протезами TASKA та окремими за'ястними з'єднувачами або електричними ротаторами. Інформацію про сумісність дивіться на нашому веб-сайті.

Необхідно регулярно обслуговувати та перевіряти ущільнювальні поверхні, щоб забезпечити збереження водостійкого з'єднання. Інструкції з догляду містяться в Посібнику користувача.

ст6

Деталі та
інструменти

ст8


Встановлення

ст12

Зняття

ст16

Попередження

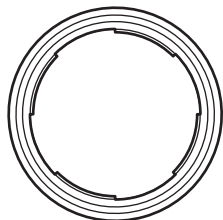

● —
А - Ущільнювальне кільце



● —
В - Інструмент для встановлення ущільнювального кільця

Встановлення

9 | Посібник із встановлення ущільнювального кільця Швидкознімного Зап'ястка TASKA для практикуючих лікарів



1



2

do more™

Посібник із встановлення ущільнювального кільця Швидкознімного Зап'ястка TASKA для практикуючих лікарів | 10




3

1. Перед встановленням перевірте поверхні кільця ущільнення та місця, де воно кріпиться до руки, на наявність бруду чи пошкоджень. За потреби очистіть поверхні м'якою вологою тканиною.
2. Під'єднайте кільце ущільнення, насадивши його на руку та обертаючи за годинникову стрілку.
3. Затягніть інструментом для встановлення кільця ущільнення, доки не відчуєте та не почуєте, як воно клацне на місці.

 **TASKA™**

13 | Посібник із встановлення ущільнювального кільця Швидкознімного Зап'ястка TASKA для практикуючих лікарів

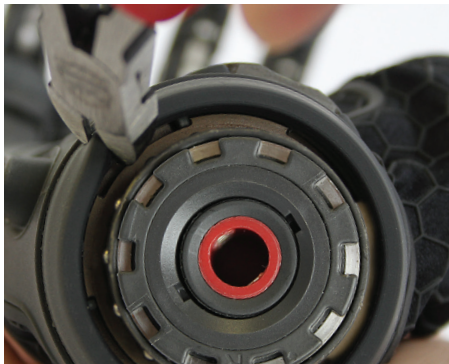

1



2

do more™

Посібник із встановлення ущільнювального кільця Швидкознімного Зап'ястка TASKA для практикуючих лікарів | 14

1. Використовуйте пару бокорізів (не входять у комплект), щоб прорізати жорстку пластикову внутрішню частину кільця ущільнення.
2. Після розрізання жорсткої пластикової внутрішньої частини, м'який залишок кільця ущільнення можна розірвати, а кільце зняти.
3. Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення нового кільця ущільнення.

⚠ Будьте обережні, щоб не подряпати металеві поверхні руки. Глибокі подряпини на металевій поверхні можуть порушити водостійкість.

 TASKA™

- Переконайтеся в тому, що Ваш пацієнт виконує всі інструкції та дотримується всіх застережень, наведених у Посібнику користувача ущільнювального кільця та закладної манжети Швидкознімного Зап'ястка TASKA.
- Якщо ущільнювальне кільце або ущільнювальна поверхня на роз'ємі для зап'ястя/електричному ротаторі пошкоджені (порвані, тріснуті, розколоті тощо), їх необхідно замінити.
- Якщо пацієнт відчуває уповільнення або гальмування під час обертання зап'ястка при використанні зап'ясткового ротатора з електроприводом, можливо, необхідно нанести трохи мастила. Можна нанести маленьку краплину наступного мастила на силіконовій основі:
 - Super-Lube Multi-Purpose Grease with Synclon (PTFE) (Універсальне мастило Супер-Люб з двокрапкою (ПТФЕ))
 - Ottobock Silicone Grease 400, medium (item # 633F11) (Силіконове мастило Оттобок, середнє (артикул # 633F11))Це мастило слід наносити на внутрішню поверхню ущільнювального кільця або робочу поверхню ротора при появі ознак уповільнення обертальних рухів.
- У разі виникнення небезпечного інциденту, пов'язаного з цим пристроєм, слід повідомити про це компанію TASKA і компетентний орган країни, в якій ви перебуваєте.
- Строк експлуатації ущільнювальних кілець становить 1 рік, тому вони підлягають заміні під час щорічного сервісного обслуговування міоелектричного протеза TASKA.

Маркування продукції - глосарій символів

Увага: наведена нижче таблиця символів носить виключно інформативний характер - деякі символи можуть не застосовуватися. Для отримання інформації про застосовні символи дивіться основну етикетку виробу, прикріплену до виробу.

СИМВОЛ	НАЗВА
	Виробник
	Уповноважений представник в Європейському Союзі
	Дата виготовлення
	Код партії
	Номер за каталогом
	Серійний номер
	Крихке, поводитися обережно
	Вгору
	Користуйтеся інструкцією із застосування
	Попередження

	Медичний виріб
	Маркування CE
	Статус потоку утилізації відходів/води електричного та електронного обладнання (WEEE)
	Глобальний торговий номер товарної одиниці
	Bluetooth
	Знак відповідності вимогам Федеральної комісії з питань зв'язку
	Знак відповідності нормативним вимогам
	Знак відповідності електронним стандартам Нової Зеландії
	За допомогою камери мобільного пристрою відскануйте QR-код
	Унікальний ідентифікатор пристрою
	Знак відповідності згідно законодавства України